


IMPLANTÁTUMOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ UNIVERZÁLIS KÉSZLET — FRKIT

Alkalmas akár a csontba integrálódott implantátum könnyű, traumáktól mentes eltávolítására is

Eltávolítandó implantátumok: törött implantátumok, súlyos periimplantitisz esete, fertőzött implantátumok, súlyos korona környéki csontvesztéssel jellemzett implantátumok, nem megfelelő pozícióba behelyezett implantátumok, sérült kapcsolatú vagy csavarmentű implantátumok.

Elkerülhető a trepán fúró használata, amely a környező csontozatot szétroncsolja, használata nehézkes és komplikációkhoz vezethet.

Lehetővé teszi ugyanolyan átmérőjű implantátumok behelyezését ugyanabba a pozícióba.

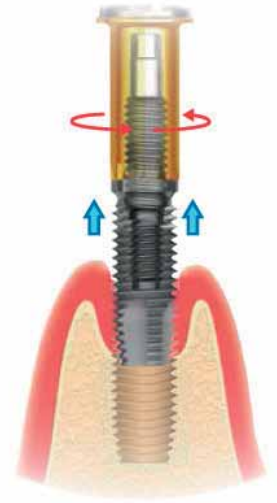

Két komponensből áll: egy csavarból, amelyet óramutató járásával azonos irányba kell az implantátumba behajtani, és egy eltávolító eszközből, amelyet az óramutató járásával ellentétes irányban kell becsavarni.

Az eltávolítás az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordítással történik, amelyhez nagy nyomatékú csavarkulcs (450 Ncm) segítségét veszik igénybe.

Különböző implantációs rendszerekhez használható.

A KÉSZLET TARTALMA

HEXAGONFEJŰ CSAVARHÚZÓ

Hosszúság (mm)	cod
7.0	HDF 1607
12.0	HDF 1612
17.0	HDF 1617

CSAVAR AZ ELTÁVOLÍTÁSHOZ

csavarméret	kód
M 1.4	FRS 14
M 1.54*	FRS 154
M 1.6	FRS 16
M 1.8	FRS 18
No 1-72 UNF	FRS 172
M 2.0	FRS 20
M 2.5	FRS 25

* nem tartozéka a készletnek

RACSNISZÁR MEGHÚZÁSI NYOMATÉK MUTATÓVAL



ELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ

implantátum átmérője	hosszúság	kód
3,5 mm	15.0 mm 20.0 mm	FR315 FR320
3,5 mm 4.0 mm	15.0 mm 20.0 mm	FR315/FR415 FR320/FR420
5.0 mm	15.0 mm 20.0 mm	FR415/FR515 FR420/FR520
6.0 mm	15.0 mm 20.0 mm	FR515/FR615 FR520/FR620




ELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ

A készlethez 4 különböző átmérőjű elem tartozik
 elem tartozik
 $\varnothing 3,5 / \varnothing 4 / \varnothing 5 / \varnothing 6$, melyek 2 hosszban
 érhetők el: 15, illetve 20 mm

HEXAGONFEJŰ CSAVARHÚZÓ

A készlethez 3 különböző hosszúságú
 elem tartozik 7, 12 és 17 mm

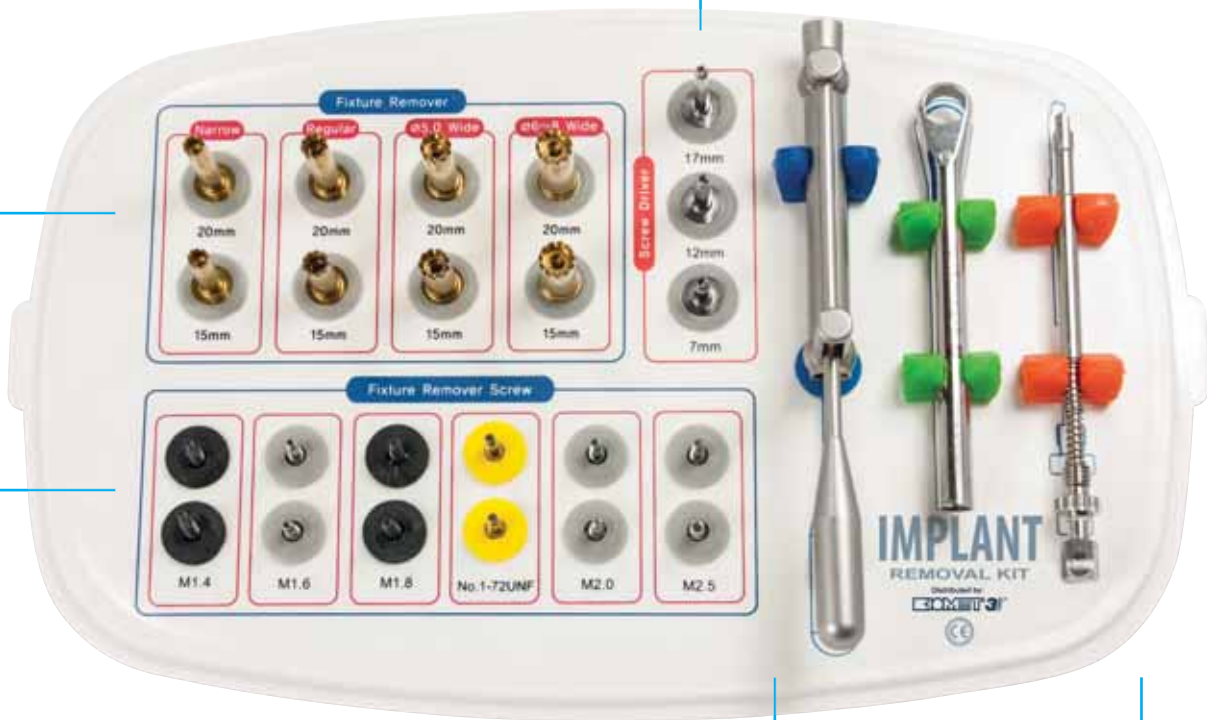

ELTÁVOLÍTÓ CSAVAR

A készlethez 6 különböző átmérőjű
 elem tartozik (páronként)
 M1.4 / M1.6 / M1.8 / No1-72 UNF / M2.0 / M2.5



RACSNISZÁR

MEGHÚZÁSI NYOMATÉK MUTATÓVAL
 A készlet magában foglal egy racsniszárat,
 amely mutatja a meghúzási nyomatékot
 (össze kell szerelni)

